

# Yeni Nesil Yara Bakımı

Revamil, tıbbi uygulamalar için seçilmiş özel saf bir baldan üretilmektedir. Revamil hiçbir katkı maddesi (pestisit, koruyucu vb.) içermemektedir. Ürünün üretiminde kullanılan Bal, Glikoz Oksidaz gibi yüksek oranda içerdiği enzimler ile terapötik etki göstermektedir.

Revamil ürünleri, Hollanda'da Bfactory laboratuvarlarında, Wageningen Üniversitesi ile yakın işbirliği içinde yüksek teknolojili medikal işlemlere tâbi tutularak üretilmektedir.

Diyabetik hastalar dâhil her yaşta hastada güvenle kullanılabilir.

Kısaca Revamil; derin ve yüzeysel yaralar ile keloid görünümlü yara izi dokusunun tedavisinde etkin bir seçeneği sunmaktadır.

## Revamil Jel (18g)

%100 izole saf bal içeriğiyle, güçlü antibakteriyel etki gösterir ve doku onarım sürecini hızlandırır. Enfekte veya enfekte olmayan çeşitli yaraların tedavisinde kullanılır.

1. Doğrudan yara üzerine ve çevresine hafifçe uygulanır, deriden emilmesi için zorlanmamalıdır.
2. Bir sekonder pansuman ile birlikte uygulanması önerilir, steril gazlı bez ve flaster gibi tıbbi sarf malzemeleri ile yaranın üstü jel uygulandıktan sonra örtülebilir.
3. Yaranın durumuna göre (eksüda kontrolü gibi) pansumanı her gün ya da iki günde bir değiştiriniz.



## Revamil Balm (50g)

Anti-sikatrizan etkisi ile, enfekte veya enfekte olmayan yüzeysel yaraların ve yara izlerinin tedavisinde, ayrıca egzema gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılır.

1. Doğrudan yara veya yara izinin; üzerine ve çevresine uygulanır, yaklaşık 10 – 15 saniye boyunca hafifçe sürülerek deri yüzeyinde ince bir tabaka kalacak şekilde emdirilir.
2. Revamil Balm uygulanan yüzeyin üzerinin merhem sürüldükten itibaren 15 – 20 dk kapanmaması önerilmektedir.
3. Yara veya yara izinin durumuna göre günde 2 – 4 kez, 3 ile 6 ay boyunca uygulanması önerilir.



## Revamil Melginate (10x10)

Aljinat içeriğiyle gelişmiş yara eksüdası kontrolü sağlayarak enfekte olan akut ve kronik yaraların (diyabetik ülserler, bası yaraları gibi) tedavisinde kullanılır.

1. Gerekli durumlarda (yüksek eksüda gibi) steril gazlı bez ve flaster gibi sekonder pansuman ile yaranın üstü uygulandıktan sonra örtülebilir.

2. Eksüda seviyesinin yüksek olması durumunda pansuman 24 saatte bir değiştirilmelidir. Diğer durumlarda ise sargı emme kapasitesine ulaştığında veya en fazla her 3 günde bir sargı değiştirilmelidir.

\* Sıvı emme kapasitesi : 12 g / 100 cm<sup>2</sup>



## Revamil Yara Örtüsü (10x20)

Saf bal içeriğiyle doku onarım sürecini hızlandırır, enfekte veya enfekte olmayan çeşitli yaraların tedavisinde ve yara izi oluşumunu engellemek için kullanılır.

1. Gerekli durumlarda (yüksek eksüda gibi) steril gazlı bez ve flaster gibi sekonder pansuman ile yaranın üstü uygulandıktan sonra örtülebilir.

2. Eksüda olması durumunda pansuman 24 saatte bir değiştirilmelidir. Diğer durumlarda ise sargı emme kapasitesine ulaştığında veya en fazla her 3 günde bir sargı değiştirilmelidir.



# Neden Revamil ?

Klinik çalışmalar ve tedavide alınan başarılı sonuçlar, Revamil'in birçok yara çeşidi ve skar tedavisinde başarılı olduğunu göstermiştir. Silikon bazlı ve heparin içeren ürünlerin aksine Revamil derin ve yüzeysel yaralarda ilk günden itibaren kullanılabilir. Ayrıca gümüş içeren ürünlerin tersine hiçbir sito-toksik etkisi yoktur.

- Skar oluşumunu engeller ve anti-sikatrizan etki gösterir
- Yaranın iyileşmesi için uygun nem oranı sağlar (fazla eksüdayı emer ve yarayı kurutmaz)
- Yara dokusuna destek olur ve granülasyonu sağlar
- Non-toksik ve non-alerjeniktir
- Antibakteriyal ve antienflamatuvar etki gösterir
- Koku oluşmasını önler
- Kolay değiştirilebilir, konforlu ve ağrısızdır
- Mikrobiyal ajanlara ve yabancı cisimlere karşı bariyer oluşturur

\*Tüm ürünlerimiz Avrupa Birliği kalite sistemi şartnamelerine uygun olarak kontrollü koşullarda üretilmektedir.